

Zalecana ilość użycia instrumentów do leczenia kanałowego



INSTRUMENTY DO LECZENIA KANAŁOWEGO wg rozmiarów ISO – zalecana MAKSYMALNA ilość użyć JEDNEGO INSTRUMENTU w kanale, pod warunkiem, że kontrola wizualna wykonywana przez dentystę przed kolejnym użyciem, wykazuje, że instrument nie jest uszkodzony poprzez poprzednie stosowanie, nie jest zagięty (nie dotyczy dogięcia instrumentu przez dentystę do krzywizny kanału tzw. pre-bending), odkształcony, nie wykazuje oznak „zmęczenia” ostrza instrumentu oraz jest pewnie umocowany w uchwycie.

Nazwa instrumentu/ Rozmiar ISO	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Pilniki S/ Endostar Pilniki S	1	1	1	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
Pilniki NiTi S/ Endostar Pilniki NiTi S	-	-	2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5	4-5	6-8	6-8
Pilniki H/ Endostar Pilniki H	1	1	1	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
Pilniki NiTi H/ Endostar Pilniki NiTi H	-	-	-	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5	4-5	6-8	6-8
Pilniki K/ Endostar Pilniki K	1	1	1	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
Pilniki NiTi K/ Endostar Pilniki NiTi K	-	-	-	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5	4-5	6-8	6-8
Poszerzacze K/ Endostar Poszerzacze K	1	1	1	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
Poszerzacze NiTi K/ Endostar Poszerzacze NiTi K	-	-	-	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5	4-5	6-8	6-8
Pilniki S-finders/ Endostar Pilniki S-finders	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Endostar Canal Locator	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpychacze do gutaperki / Endostar Rozpychacze do gutaperki	-	-	1	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
Rozpychacze NiTi do gutaperki / Endostar Rozpychacze NiTi do gutaperki	-	-	-	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5	4-5	6-8	6-8
Upychadła do gutaperki/ Endostar Upychadła do gutaperki	-	-	-	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
Upychadła NiTi do gutaperki/ Endostar Upychadła NiTi do gutaperki	-	-	-	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5	4-5	6-8	6-8

Nazwa instrumentu/ Rozmiar ISO	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Pilniki S/ Endostar Pilniki S	4-5	4-5	4-5	4-5	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Pilniki NiTi S/ Endostar Pilniki NiTi S	6-8	6-8	6-8	6-8	-	-	-	-	-	-
Pilniki H/ Endostar Pilniki H	4-5	4-5	4-5	4-5	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Pilniki NiTi H/ Endostar Pilniki NiTi H	6-8	6-8	6-8	6-8	-	-	-	-	-	-
Pilniki K/ Endostar Pilniki K	4-5	4-5	4-5	4-5	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Pilniki NiTi K/ Endostar Pilniki NiTi K	6-8	6-8	6-8	6-8	-	-	-	-	-	-

Poszerzacze K/ Endostar Poszerzacze K	4-5	4-5	4-5	4-5	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Poszerzacze NiTi K/ Endostar Poszerzacze NiTi K	6-8	6-8	6-8	6-8	-	-	-	-	-	-
Pilniki S-finders/ Endostar Pilniki S-finders	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endostar Canal Locator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpychacze do gutaperki / Endostar Rozpychacze do gutaperki	4-5	4-5	4-5	4-5	-	-	-	-	-	-
Rozpychacze NiTi do gutaperki / Endostar Rozpychacze NiTi do gutaperki	6-8	6-8	6-8	6-8	-	-	-	-	-	-
Upychadła do gutaperki/ Endostar Upychadła do gutaperki	4-5	4-5	4-5	4-5	-	-	-	-	-	-
Upychadła NiTi do gutaperki/ Endostar Upychadła NiTi do gutaperki	6-8	6-8	6-8	6-8	-	-	-	-	-	-

System S5/ Endostar System E5:

Pilniki numer 5,4,3 powinny być użyte maksimum do 5 razy. Pilniki numer 2 i 1 można używać większą ilość razy, pod warunkiem, że nie są zdeformowane i są używane rozważnie maksymalnie do 10 razy.

Endostar E3 Basic Rotary System, Endostar E3 Small Apical Rotary System, Endostar E3 Big Apical Rotary System, Endostar RE Re endo Rotary System, Endostar NT2 NiTi Two Rotary System, System do usuwania gutaperki GPR/ Endostar System do usuwania gutaperki GPR, System S5 Big Apical Files (BAF)/ Endostar System E5 Big Apical Files (BAF), System NiTi TEE/ Endostar System NiTi TEE, System NiTi TWO/ Endostar System NiTi TWO:

Pilniki o odchodzeniu (taper) 2,4,6 powinny być użyte maksimum do 5 razy, a pilniki o odchodzeniu (taper) 8 i 10 mogą być użyte do 10 razy.

Miazgociągi/ Endostar Miazgociągi

Rozmiar:	Zalecana ilość użyć:
00	1
01	2-3
02	2-3
03	2-3
04	4-5
05	4-5
06	4-5

Poszerzacze Peeso/ Endostar Poszerzacze Peeso; Poszerzacze Gates/ Endostar Poszerzacze Gates:

Rozmiar:	Zalecana ilość użyć:
1	5
2	5
3	5
4	10
5	10

Igły do wypełniania kanału ze sprężynką bezpieczeństwa (PFL) / Endostar Igły do wypełniania kanału ze sprężynką bezpieczeństwa (PFL), Igły do wypełniania kanału bez sprężynki (PFN) / Endostar Igły do wypełniania kanału bez sprężynki (PFN)

Rozmiar:	Zalecana ilość użyć:
25	1 – 2
30	4 – 5
35	4 – 5
40	4 – 5

Endostar Spreader Sonic Files:

Rozmiar:	Zalecana ilość użyć:
25	1 – 2
30	2 – 3
35	2 – 3

Endostar Unique S-files, Endostar Unique K-files

Rozmiar:	Zalecana ilość użyć:
12,5	1 – 2
17,5	1 – 2
22,5	1 – 2



UWAGA!

Użycie instrumentu więcej razy niż jest to zalecane może spowodować złamanie ostrza w kanale



Dane wytwórcy:

Poldent Sp. z o. o.

Dzika 2

00-194 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, www.endostar.eu, e-mail: poldent@poldent.pl endostar@endostar.eu

Data ostatniej aktualizacji instrukcji: 01.2018