


1 Włączyć urządzenie Endostar Provider: nacisnąć wyłącznik główny.

Wyświetlony zostanie ekran trybu oczekiwania.

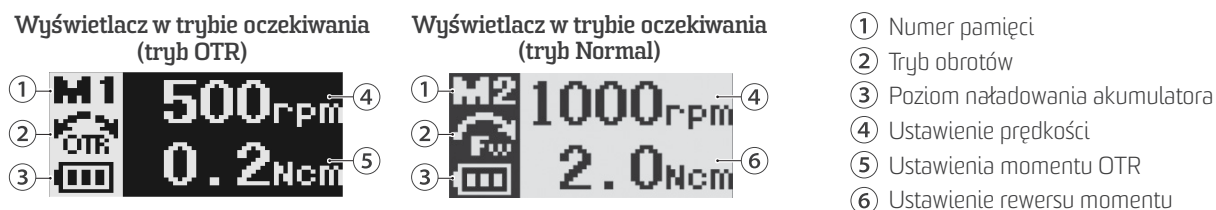

2 Wybrać numer pamięci: nacisnąć przycisk plus lub minus.


Ustawienia fabryczne (Ustawienia te można zmienić).

Ustawienie	Pamięć					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Prędkość (obr./min)	500	300	500	500	300	500
Rewers obrotów (Ncm)	0,2	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0
Tryb obrotów	OTR	OTR	OTR	Normal (do przodu)	Normal (do przodu)	Normal (do przodu)
Zmniejszanie momentu	—	—	—	Off (wył.)	Off (wył.)	Off (wył.)

3 Uruchomić silnik: ponownie nacisnąć wyłącznik główny.

Wyświetlony zostanie ekran momentu.

* W przypadku przytrzymania wyłącznika głównego silnik będzie pracował tak długo, jak długo wciśnięty będzie wyłącznik i zatrzyma się po zwolnieniu wyłącznika.

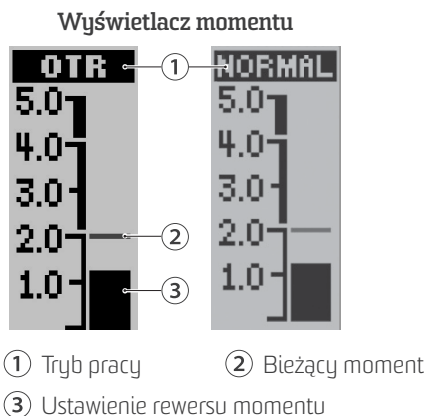

4 Zatrzymać silnik: ponownie nacisnąć wyłącznik główny.

Ponownie wyświetlony zostanie ekran trybu oczekiwania.

